



1



4



2



5



3

protect.St pro

Назначение

protect.St pro представляет собой мягкий ортез для коленного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Нестабильность легкой и средней степени
- Хроническая нестабильность
- Повреждения мениска

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по применению

- Расстегните ремни для бедра и голени. Отстегните ремни от одной из застежек на поверхности изделия.
- Наденьте ортез на ногу, держась за петли на верхнем крае изделия. Расположите полицентрический шарнирный механизм так, чтобы середины шарниров располагались на уровне верха надколенника.
- Сначала затяните ремень для голени, затем - ремень для бедра.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан, алюминий

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.