


# medi Hospital Butler

## Уважаемый покупатель!

Вы приобрели вспомогательное приспособление для облегчения надевания компрессионного трикотажа medi Hospital Butler («МЕДИ ХОСПИТАЛ БАТЛЕР»).

Запатентованное изделие medi Hospital Butler предназначено для использования в условиях стационара для облегчения процесса надевания госпитального компрессионного трикотажа у пожилых, малоподвижных и ослабленных пациентов.

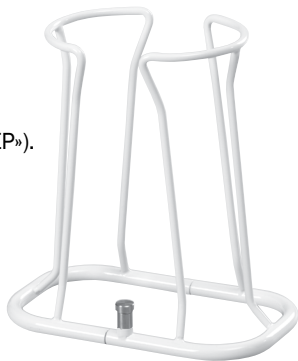

## Преимущества medi Hospital Butler

- Простота использования
- Экономия времени
- Безболезненное для пациента надевание антиэмболических чулок
- Возможность регулировки изделия (при необходимости) в зависимости от размера (объема) голени пациента
- Может использоваться при травмах нижней конечности

**Состав материала:** сталь, эмаль.

**Цвет:** белый.

## Рекомендации по хранению, транспортировке и гарантийные периоды

Храните medi Hospital Butler в сухом проветриваемом помещении вдали от источников пыли и влаги. При хранении и транспортировке оберегайте medi Hospital Butler от механических повреждений, которые могут привести к деформации конструкции, появлению трещин и царапин, нарушающих правильную работу приспособления и способных повредить компрессионное изделие при надевании. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции по использованию.

## Особые указания


Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти, если Вы носите кольца. Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки. Пожалуйста, помните, что в результате чрезмерного растяжения компрессионный трикотаж может быть поврежден.

## Рекомендации по уходу

При загрязнении протирайте medi Hospital Butler сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ  
medi в России



 8-800-250-39-37  
(бесплатный звонок по России)  
[www.medirus.ru](http://www.medirus.ru)

## Рекомендации по надеванию госпитального компрессионного трикотажа (ГКТ) с помощью medi Hospital Butler



1. Поставьте medi Hospital Butler на стол. При необходимости приподнимите фиксатор механизма блокировки вверх и, держась за ребра конструкции, раздвиньте края medi Hospital Butler в стороны (в зависимости от объема голени пациента).



2. Держась двумя руками за верхний край госпитального компрессионного трикотажа (ГКТ), расположите его вертикально внутри medi Hospital Butler таким образом, чтобы пяточная область изделия была обращена к Вам, а носочная – от Вас.



3. Двумя руками натяните резинку ГКТ на верхние дугообразные края medi Hospital Butler, и протяните изделие вниз по внешним ребрам конструкции к основанию до появления пяточной области изделия.



4. Возьмите medi Hospital Butler одной рукой, другой рукой поддерживайте ногу пациента, помогая ему вставить ступню в центр изделия таким образом, чтобы пальцы ступни достигли носочной области ГКТ. Плавно сдвигайте medi Hospital Butler вверх по ноге пациента в сторону колена, следя за тем, чтобы носочная и пяточная области ГКТ были надеты правильно.



5. Придерживая рукой ГКТ, снимите medi Hospital Butler, опустив его вниз, и отставьте в сторону. Равномерно, не перекручивая, расправьте ГКТ по ноге пациента.